

CONSEILS

Attention à ne pas détériorer ou perforer votre surmatelas avec tout objet pointu (bijoux, chaussures, griffes d'animaux...).

Enfants et personnes âgées ou fragiles : veillez à utiliser le surmatelas CLIMSOM CANICULE sous supervision et surveillance d'un adulte responsable.

Utilisez la fraîcheur pour bien dormir en période de fortes chaleurs, éviter la sudation, soulager les jambes lourdes, apaiser les jambes sans repos, activer les graisses brunes. Utilisez la chaleur sur les lombalgies, lumbagos et autres contractures musculaires. La fraîcheur ou la chaleur sera ressentie même à travers les vêtements.

En période caniculaire, nous vous conseillons de **mettre votre équipement en route 45 minutes avant le coucher**. C'est le temps qu'il faudra pour atteindre les températures les plus fraîches et optimiser l'inertie thermique. Nous vous conseillons également de couvrir votre surmatelas et votre oreiller d'une couette ou d'une couverture durant cette période afin que l'ensemble de votre literie se gorge de fraîcheur.

Votre Climsom vous permet également de programmer un départ différé ou un arrêt anticipé. Reportez-vous à la notice de votre thermo-contrôleur.

Optez pour le CLIMSOM CANICULE en période de canicule pour un confort *thermique* optimisé. En période de températures modérées, le CLIMSOM PERSONAL ou DOUBLE sera plus adapté pour un confort *mécanique* optimisé.

COMPOSITION

Surmatelas CLIMSOM CANICULE	100% PVC
Flexible	100% SILICONE

Découvrez nos autres produits de bien-être et de literie sur notre site Internet www.climsom.com.
Contactez-nous par mail à l'adresse contact@climsom.com ou par téléphone au 02 85 52 44 74.

(climsom) *Canicule*

Sur-matelas climatisé




Pour fonctionner, le sur-matelas CLIMSOM CANICULE doit être connecté à un thermo-contrôleur CLIMSOM.

Le sur-matelas CLIMSOM CANICULE permet d'atteindre les températures les plus fraîches du fait de sa matière en PVC qui améliore le transfert thermique, de la quantité d'eau qui parcourt le « quadrillage » et de l'importance de la surface d'échange thermique.

Lire attentivement ce manuel avant utilisation



DESCRIPTION

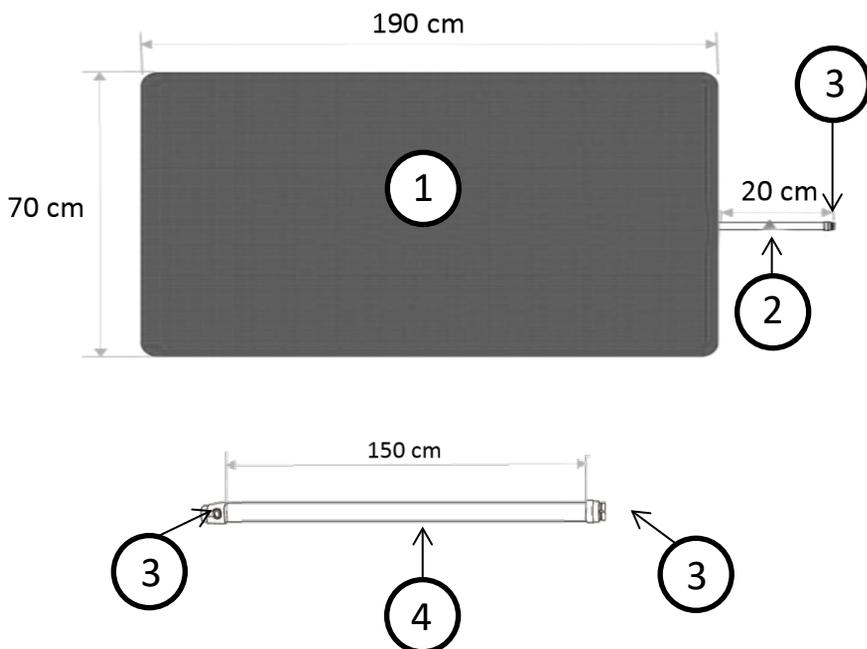

- 1 – Sur-matelas 100% PVC CLIMSOM CANICULE
- 2 – Tuyau de connexion
- 3 – Connecteurs avec système stop-goutte
- 4 – Flexible de raccord avec votre thermo-contrôleur CLIMSOM (1,50m)

INSTALLATION

1 – Placez votre surmatelas CLIMSOM CANICULE (1) entre votre matelas et votre drap housse, ou directement sur votre drap-housse. Par souci de maintien et de protection, il est préférable de le placer sous le drap housse.

2 – Connectez votre CLIMSOM CANICULE (1) à votre thermo-contrôleur CLIMSOM grâce au flexible de 1,50m fourni (4). Assurez-vous que chaque connecteur (3) soit bien branché. Vous devez entendre un « clic ».

3 – Remplissez entièrement le réservoir de votre thermo-contrôleur CLIMSOM d'eau, idéalement déminéralisée ou distillée, ou à défaut faiblement minérale et peu calcaire. Laissez le bouchon du thermo-contrôleur ouvert durant toute la durée de remplissage du surmatelas (étapes 3 et 4).

4 – Allumez votre thermo-contrôleur CLIMSOM : à cette étape, l'eau contenue dans le réservoir va se vider afin de remplir le surmatelas CLIMSOM CANICULE. Remplissez à nouveau le réservoir. Afin que l'eau se répartisse correctement sur l'ensemble de la surface du surmatelas, exercez quelques pressions simplement en vous allongeant dessus quelques minutes. Au total, il sera nécessaire d'ajouter de l'eau 2 à 3 fois afin de remplir le surmatelas et le réservoir au maximum, pour un total d'environ 1,7L.

5 – Réglez la température directement sur l'appareil ou grâce à sa télécommande. Essayez, pour commencer, des températures modérées (23-28°C) afin de trouver progressivement votre température personnelle de confort.

Le CLIMSOM CANICULE permet d'atteindre des températures comprises entre 15°C et 48°C, ces températures sont données à titre indicatif car dépendantes de nombreux facteurs (volume et ventilation de la pièce, température environnante, température du dormeur, morphologie du dormeur, inertie thermique du matelas...).

ENTRETIEN

Le sur-matelas CLIMSOM CANICULE peut être nettoyé à l'éponge et au savon doux, sans détergent.

- Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de sèche-linge.
- Ne pas exposer au soleil.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas marquer les plis lorsque vous rangez votre CLIMSOM CANICULE.
- Avant de le stocker, videz l'eau contenue dans le sur-matelas en pressant sur les ressorts « stop-goutte » du connecteur à l'aide de la clé de vidange fournie avec votre thermo-contrôleur, et placez le produit dans un endroit sec.
- En raison des différences de température, une condensation peut se former : aérez votre lit régulièrement.



PRÉCAUTIONS

- Ce produit est conçu pour votre confort et pour un usage domestique. En cas de doute sur l'utilisation de la chaleur ou de la fraîcheur dans votre situation personnelle, consultez un médecin.
- En cas de malaise ou d'inconfort, cessez l'utilisation du sur-matelas CLIMSOM CANICULE et demandez l'avis d'un médecin.