

NOTICE D'UTILISATION

DE LA CEINTURE DE LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE LED

INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- En cas de sensibilité de la peau.
- En cas de prise de médicaments pour la peau.
- En cas de maladies infectieuses ou inflammatoires de la peau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE DISPOSITIF

- 1) N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.
- 2) Il est préférable de ne pas regarder directement la lumière, afin de ne pas affecter la vision.
- 3) Quand vous utilisez la ceinture et que vous ne souhaitez pas que les LED touchent votre peau, vous pouvez positionner la ceinture de protection entre les LED et votre peau.
- 4) Il est important de ne pas mouiller la ceinture et de ne pas la plonger dans l'eau. Gardez-la au sec pour éviter tout risque électrique.
- 5) Lorsque vous nettoyez la ceinture, assurez-vous que celle-ci ne soit pas connectée à une source d'alimentation. Déconnectez l'appareil et nettoyez légèrement la ceinture ou l'élastique avec une brosse à dents. Nettoyez que la partie en tissu. Ne pas laver les LED.
- 6) Après utilisation, débranchez l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser l'appareil dans un endroit humide.
- 7) Ne rangez pas la ceinture dans un endroit fortement exposé au soleil ou à une température élevée.
- 8) Après l'utilisation de la ceinture, veillez à la replacer dans son sac et la plier comme indiqué sur la notice ci-dessous :



PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

A PROPOS DE LA CEINTURE DE THÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE LED


Le dispositif de lumière rouge utilise une combinaison de longueurs d'onde de 660 nm et de 850 nm proche infrarouge pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. La thérapie par lumière rouge reconnue par la recherche médicale va permettre de stimuler les cellules en profondeur pour les régénérer et les réparer.

Les avantages de la thérapie par la lumière rouge à 660 nm :

- Soulager les douleurs musculaires et articulaires
- Améliorer la circulation sanguine
- Augmenter la production de collagène
- Accélérer la cicatrisation de plaies
- Éliminer les taches de vieillissement et les rides
- Optimiser le traitement des rhumatismes et douleurs au niveau de la taille

Les avantages de la thérapie par lumière rouge à 850 nm :

- Réparer les tissus en profondeur
- Fournir de l'énergie aux cellules
- Optimiser la récupération musculaire
- Améliorer la circulation sanguine
- Réduire les douleurs articulaires et les inflammations
- Renforcer le système immunitaire

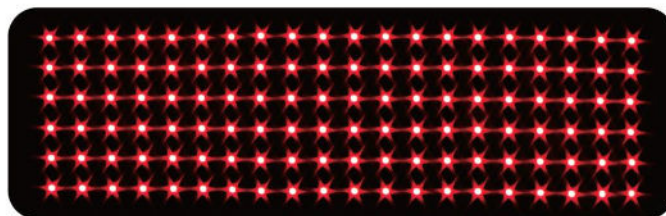

CONNEXION DE L'APPAREIL

- 1 – Insérez l'adaptateur 12 V dans la prise murale et connectez-le à la ceinture.
- 2 – Utilisez le câble USB pour connecter la borne d'entrée de la ceinture avec le boîtier d'alimentation mobile. Veuillez noter que la batterie mobile n'est pas incluse dans le pack.



UTILISATION DE L'APPAREIL

La ceinture de thérapie peut se porter au niveau de l'épaule, du cou, de la nuque, du dos, du genou ou du pied.



- 1) Lorsque vous appuyez sur le premier bouton, la lumière verte s'affiche et toutes les LED s'allument en continu. La durée d'utilisation est fixée à 20 minutes. La lumière rouge à 660 nm est visible, tandis que la lumière infrarouge à 850 nm est imperceptible à l'œil nu.
- 2) Appuyer à nouveau sur ce même bouton pour allumer la lumière rouge à 660 nm en mode continu.
- 3) Appuyer une troisième fois sur le bouton pour allumer la lumière infrarouge à 850 nm en mode continu.
- 4) Pour éteindre le voyant vert, vous devez appuyer une nouvelle fois sur le bouton.



La thérapie par pulsation pour une meilleure récupération

- 1) Une fois, le bouton d'alimentation allumé, appuyez sur ce même bouton pendant plus de 3 secondes. Le bouton d'alimentation s'allume en bleu, et toutes les LED passent en mode pulsation de 10 Hz. La durée d'utilisation est fixée à 20 mn.
- 2) Appuyer à nouveau sur ce même bouton pour passer en mode pulsation de 10 Hz avec une lumière rouge à 660 nm.
- 3) Appuyer une troisième fois sur le bouton pour passer en mode pulsation de 10 Hz avec une lumière infrarouge à 850 nm.
- 4) Pour désactiver le mode pulsation, vous devez appuyer une nouvelle fois sur le bouton.

DURÉE DE TRAITEMENT

Le temps de traitement recommandé est de : 20 minutes par jour

DONNÉES TECHNIQUES

Nom : Ceinture de luminothérapie à lumière rouge LED

Éclairage : 120 LED * 0.5 W

Type de lumière : Lumière rouge à 660 nm et lumière infrarouge à 850 nm

Minuteur : 20 mn

Durée de vie des LED : 50 000 heures

Puissance évaluée : 60 W / Puissance réelle : 20 W

Tension : 100 – 240 V

Fréquence : 50-60 Hz

Dimensions : L 530 x H 80 mm

Poids : 500 g

Température recommandée pendant la mise en route : entre 0 et 45 °C

Température recommandée pour le transport et le stockage : entre 20 et 60 °C

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

