



Notice d'utilisation

VolcaNuque, le coussin cervicales volcanique 3 en 1

Utilisé chaud, le coussin VolcaNuque va vous permettre de **soulager vos douleurs et tensions** au niveau de la nuque et des épaules.

Utilisé frais, le coussin VolcaNuque va **activer vos graisses brunes et brûler ainsi des graisses blanches**. Sa forme s'adapte à vos épaules et votre nuque.

Son poids de **1,8kg** lui donne sa stabilité et lui permet de rester bien en place y compris si vous bougez.



Le principe



Cibler
la nuque

Le coussin VolcaNuque est composé de gel, d'eau et de **8% de pierre volcanique**.

La pierre volcanique lui confère un **confort idéal** et un **bon maintien de la température**, et permet une **bonne diffusion de la chaleur ou de la fraîcheur**.



Cibler
les épaules

Grâce à sa forme et à sa composition, vous allez pouvoir choisir de le placer selon les deux positions en photos, voire sur d'autres zones du corps

Le choix des deux positions vous permet de **cibler une zone précise** et vous garantit un **confort optimal** et une **application adaptée à votre besoin**.

Entretien & stockage

Le **revêtement en polyester du coussin VolcaNuque** lui donne une bonne résistance en plus de sa facilité d'entretien.

Nettoyer votre VolcaNuque à l'aide d'une éponge humide et de savon doux.

N'utilisez pas d'éponges abrasives ou de produits détergents.

Ne le mettez pas en machine à laver ou au sèche-linge. Gardez-le à l'abri du soleil.

Rangez votre VolcaNuque dans un endroit propre et sec.

Découvrez nos autres produits sur www.climsom.com

NEO FACTORY / CLIMSOM – 6 allée du commandant Charcot – 44000 Nantes

02.85.52.44.74 – contact@climsom.com

Utilisations et bienfaits

Utilisation :

- **Thermothérapie (par la chaleur) :**
Placez-le au micro-ondes de 3 à 4 minutes à puissance moyenne ou au bain-marie pendant 5 minutes. Renouvelez une fois si vous souhaitez plus de chaleur
Malaxez le coussin avant application sur la zone à soulager ou à traiter en le prenant avec une serviette pour ne pas risquer de vous brûler. De même, enveloppez votre VolcaNuque dans une serviette fine avant application.
- **Cryothérapie (par la fraîcheur) :**
Placez le coussin **environ 4 heures au réfrigérateur** ou 15 minutes maximum au congélateur. Enveloppez votre VolcaNuque dans une serviette fine pour que le froid ne soit pas trop saisissant sur la peau.

Bienfaits :

- **Thermothérapie (chaleur) :**
 - ✓ Soulage les **torticolis, rhumes, bronchites, sinusites, troubles du sommeil.**
 - ✓ Favorise la **décontraction musculaire** du cou et des trapèzes.
- **Cryothérapie (froid) :**
 - ✓ Soulage les **sciatiques, ecchymoses, migraines et douleurs dentaires.**
 - ✓ Active les graisses brunes pour un **effet brûle-graisse.**
2 heures d'application de fraîcheur peut correspondre à 50gr de graisses brûlées (sur les 24h suivantes)
 - ✓ Vous pouvez appliquer votre coussin VolcaNuque sur d'autres parties du corps pour soulager **entorses, sciatique ou ecchymoses.**

Garantie

Ce produit n'est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas garantir les conséquences de l'utilisation du coussin. Neo Factory - Climsom garantit l'acheteur d'origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur le VolcaNuque. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit défectueux à l'exclusion de toute autre réparation.



Découvrez nos autres produits sur www.climsom.com

NEO FACTORY / CLIMSOM – 6 allée du commandant Charcot – 44000 Nantes
02.85.52.44.74 – contact@climsom.com