

PRECAUTIONS

- Ce produit ne se destine pas à une application médicale, il est réservé à un usage domestique.
- En cas de doute sur l'utilisation de la chaleur ou de la fraîcheur dans votre situation, consultez un médecin.
- En cas de malaise ou d'inconfort, cessez l'utilisation du sur-matelas CLIMSOM INTENSE et demandez l'avis d'un médecin.
- Ne pas exposer de manière prolongée au soleil
- Pour le stockage, videz l'eau contenue dans le sur-matelas en pressant sur les ressorts « stop-goutte » du connecteur et placez le produit dans un endroit sec.
- Pliez avec précaution, ne pas marquer les plis.
- En raison des différences de température, une condensation peut se former : aérez votre lit régulièrement.

ASTUCES

- 1) Utilisez la fraîcheur intense pour soulager les jambes lourdes et apaiser les jambes sans repos. La fraîcheur ou la chaleur sera ressentie même à travers les vêtements.
- 2) Utilisez la chaleur intense sur les lombalgies, lumbagos et autres contractures musculaires.
- 3) Mettez-vous sur la surface « douce » du sur-matelas CLIMSOM INTENSE dès que vous souhaitez une température plus modérée.

COMPOSITION

Plastic Surface	PVC / NYLON
Inside Mattress	SILICONE / PVC
Mattress Protector	POLYESTHER 80% - COTTON 20%

(climsom) *intense*

Sur-matelas de thermothérapie




Le sur-matelas CLIMSOM INTENSE permet d'atteindre les températures les plus fraîches ou les plus chaudes, du fait de sa matière en silicone qui améliore le transfert thermique et de la quantité d'eau relativement importante qui parcourt le « quadrillage » silicone.


Lire attentivement ce manuel avant utilisation



DESCRIPTION

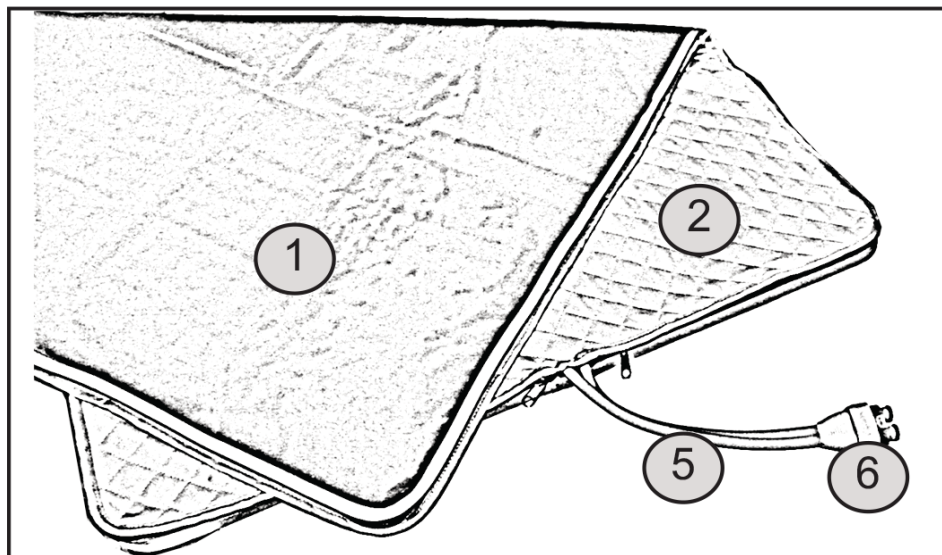

- 1 – Surface thermo-contrôlée « intense »
- 2 – Surface thermo-contrôlée « douce » en tissu
- 3 – Housse lavable en machine
- 4 – Sur-matelas silicone intérieur
- 5 – Tuyau de connexion
- 6 – Connecteur

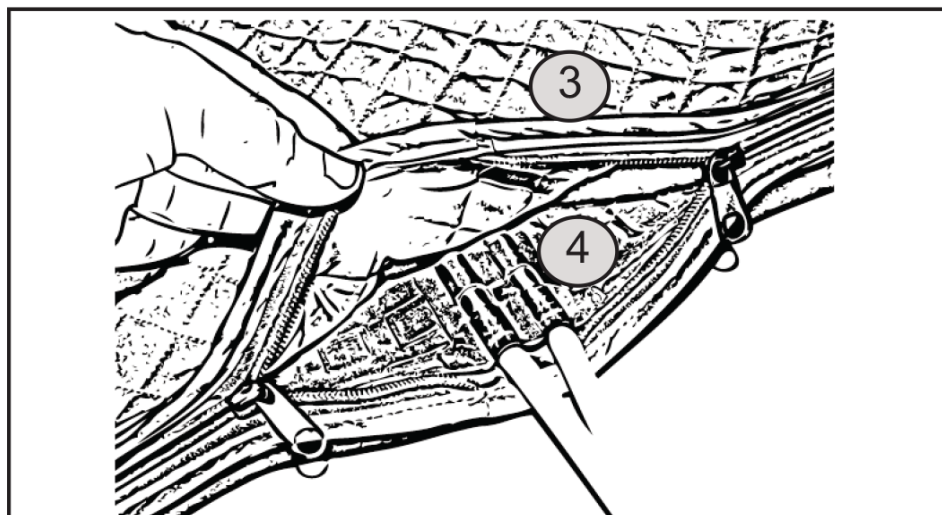

1

INSTALLATION

- 1) Connectez votre CLIMSOM INTENSE à votre thermo-contrôleur CLIMSOM.
- 2) Remplissez le réservoir d'eau de votre thermo-contrôleur CLIMSOM.
- 3) Positionnez la surface thermo-contrôlée « intense » (1) pour un contact direct avec l'utilisateur ou choisissez la surface thermo-contrôlée « douce » (2) si vous souhaitez moins d'intensité thermique.
- 4) Allumez votre thermo-contrôleur CLIMSOM et réglez la température. Essayez, pour commencer, des températures modérées afin de trouver progressivement votre température de confort personnel.

ENTRETIEN

Le sur-matelas silicone intérieur (4) peut être nettoyé à l'éponge et au savon, sans détergent.

La housse (3) peut être lavée en machine (programme délicat, 30°C, sans eau de javel), après avoir ôté le sur-matelas silicone intérieur (4).

- ⚠ Laisser sécher à l'air libre – Ne pas utiliser de sèche-linge.
- ⚠ Ne pas repasser.
- ⚠ Ne pas nettoyer à sec.
- ⚠ Ne pas marquer les plis lorsque vous rangez votre CLIMSOM INTENSE.

Découvrez nos autres produits de bien-être et de literie sur www.climsom.com

Contactez nous : contact@climsom.com ou par téléphone au 01 56 03 55 76

2