

# NOTICE D'UTILISATION DU MASSEUR OCULAIRE INTELLIGENT

## INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné.

Cet appareil est conçu pour un usage privé et n'est pas destiné à des fins médicales ou commerciales.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas cet appareil comme un jouet.

Lorsque l'appareil est en service, veuillez ne pas placer cet appareil à proximité d'un feu, d'un liquide corrosif ou d'autres environnements défavorables.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé.

Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veuillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes enceinte.
- Si vous souffrez d'une maladie des yeux : glaucome, cataracte, décollement de la rétine ou si vous avez subi une intervention chirurgicale grave des yeux.
- Si vous souffrez d'une inflammation des yeux.
- Si vous avez une blessure à l'œil.
- Si vous avez des séquelles d'AVC ou toute autre maladie grave.
- Si vous avez moins de 7 ans.
- Si vous avez une forte myopie.

Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil en cas de doute.

## RÈGLES DE RÉCLAMATION


La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

## DANS QUELS CAS UTILISER LE MASSEUR ?

- Lorsque vous passez de longues heures devant un écran (ordinateur, télévision, smartphone, etc.) afin de soulager la fatigue oculaire due au travail, aux études...
- Suite à une période de concentration intense, pour permettre une pause relaxante et reprendre avec un nouvel élan.
- Quand vous ressentez les premiers symptômes d'un mal de tête.
- Pour prévenir et atténuer les migraines ophtalmiques.
- Au quotidien, pour décharger les tensions.
- Juste avant le coucher pour favoriser l'endormissement.
- Ou tout simplement, chaque fois que vous ressentez le besoin d'une pause revigorante.

## DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DU MASSEUR

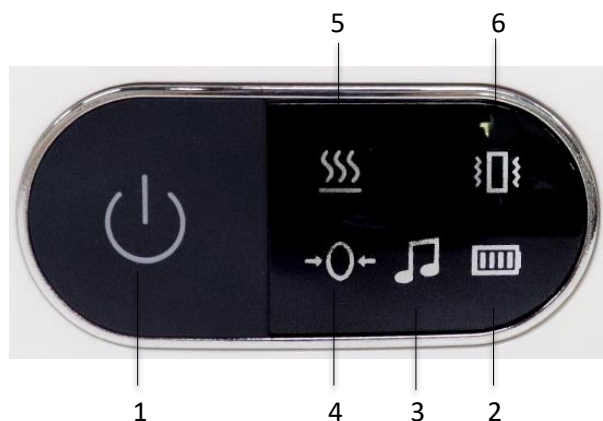

- 1 – ON/OFF : appuyez 3 secondes sur ce bouton pour allumer et éteindre l'appareil. Une brève pression sur ce même bouton permet de changer les modes de massage.
- 2 – Indicateur de batterie : LED clignotante lorsque l'appareil est en charge. LED allumée en continu quand la batterie est chargée.
- 3 – Fonction Musique ou fonction Bluetooth
- 4 – Fonction pression d'air
- 5 – Fonction chaleur
- 6 – Fonction vibration

## MODES DE MASSAGE

Cette appareil vous propose 4 modes de massage :

Mode	Pression d'air	Chaleur	Vibrations	Option		Temps en mn
				Bluetooth	Musique	
Dynamisant	✓	✓	✓	✓	✓	10
Relaxant	✓	✓		✓	✓	15
Soin pour les yeux	✓	✓		✓		15
Sommeil	✓			✓	✓	20

## FONCTIONS DU MASSEUR OCULAIRE

Une voix vous guide dans l'utilisation de l'appareil.

Fonction de vibration multiple.

Fonction chaleur : 38 - 42° C.

4 modes de massage : dynamisant, relaxant, soin pour les yeux, sommeil.

3 musiques intégrées : bruit de l'eau qui coule, chant des oiseaux, bruits de la nature.

Option musique via Bluetooth : fonction de commutation intelligente entre le type musique et le type Bluetooth. Lorsque le masseur est connecté à un téléphone portable ou à un ordinateur en Bluetooth, l'icône Bluetooth apparaît sur l'écran du masseur et la fonction est automatiquement activée.

Timer intégré : l'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps de la séance est écoulé.

Autonomie de la batterie : 2 heures.


Temps de charge : 2 heures.

Clignotement du voyant en cas de panne d'électricité, alarme "DI" toutes les 2 minutes, Quand il n'y a pas de courant, l'appareil s'éteint. Lorsque le courant est coupé, l'appareil s'éteint. Et lorsque le courant est rétabli, l'appareil émet une alarme "DI" 3 fois.

## FONCTIONNEMENT

1. Ajustez l'élastique et installez-vous confortablement sur un canapé ou une chaise lors de l'utilisation.
2. Utilisez ce dispositif 1 à 2 fois par jour. Chaque séance dure entre 10 et 20 minutes selon le mode de massage sélectionné. Et n'ouvrez pas les yeux lorsque vous utilisez ce dispositif.
3. Veuillez utiliser l'appareil après l'avoir rechargé.
4. Nettoyez la surface de l'appareil avec une serviette humide ou du coton imbibé d'alcool médical à 75 %.

## CONNEXION BLUETOOTH

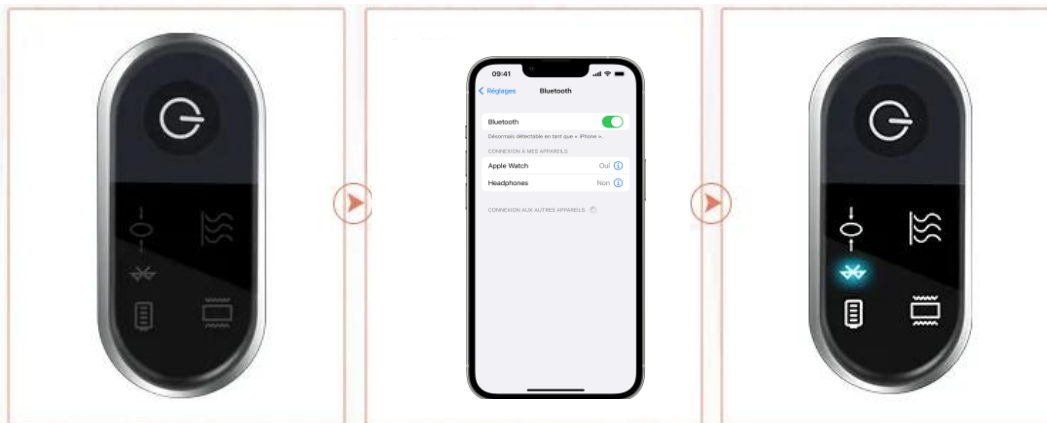

- 1 – Allumez le masseur en appuyant 3 secondes sur le bouton ON/OFF.
- 2 – Activez le Bluetooth de votre téléphone ou de votre ordinateur et cherchez l'appareil « Eye Massager »
- 3 – Connectez le masseur, l'icône Bluetooth apparaît en couleur bleue sur l'écran du masseur oculaire.

## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : Masseur oculaire intelligent

Matériaux : ABS haut de gamme pour la coquille et tissu respirant en flanelle pour l'intérieur du masque

Pression d'air : 860 hPa -1060 pHa

Fréquence de vibration : 40Hz-100Hz

Puissance : 5W

Tension : 3.7V


Dimensions : 200 x 75 x 105 mm

Poids : 320 g

## ÉLIMINATION DU PRODUIT

Quand l'unité principale (y compris la batterie au lithium) et les accessoires de ce produit ont atteint leur durée de vie, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale.

Pour enlever la batterie de l'appareil, procédez comme suit :

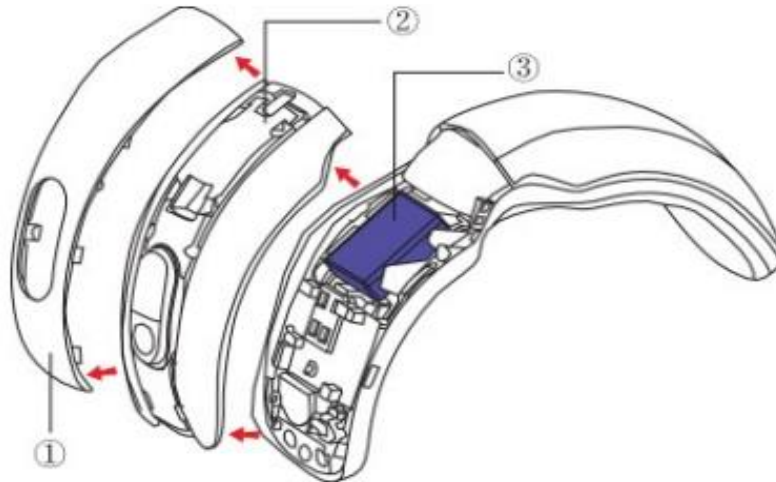

1 – Ouvrez la coque de l'appareil où se trouve l'écran de contrôle.

2 – Dévisser les six vis qui se trouvent sur la partie droite comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

3 – Ouvrez la structure et retirez la batterie.

Le produit est équipé du logo suivant :

